


# 子供用PPフェイスシールド


ウイルス飛沫、花粉、ほこりから顔を保護するフェイスマスクシールド

国内  
生産品!


## 1-簡単な組立タイプ!

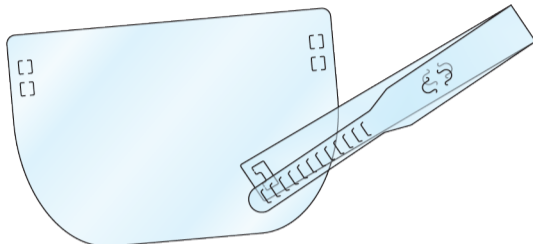

シールドとヘアバンドが分かれている為、コンパクトに保管が可能です。

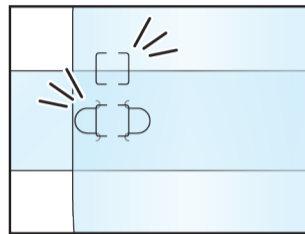

頭のサイズに合わせて引っ掛けを調整可能です。

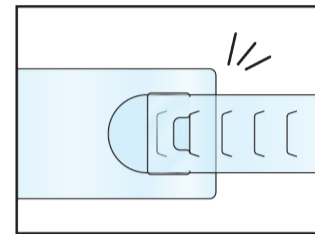

ヘアバンドはサイズ調整が可能です。

## 2-視界良好!

高透明PPシート(ポリプロピレン樹脂)を使用しているため、視界がクリアです。

## 3-消毒をして再利用が可能!


PP素材は耐薬品性に優れ、アルコール消毒などでのふき取りが可能です。

## 4-重さ22gの超軽量! ずれにくい!

シールドの厚さが0.3mmで軽く、適度な強度があり、使いやすい仕様です。また、超軽量なので長時間使用してもストレスフリー!


## PPフェイスシールド使用説明書

### シールドとヘアバンドの組立方法

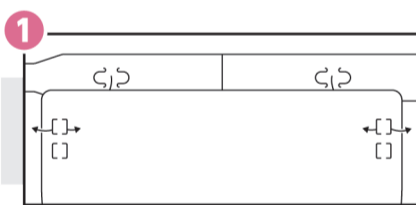


シールドの上部左右に付いている差し込み穴にヘアバンドを引っ掛けます。

#### Point.1

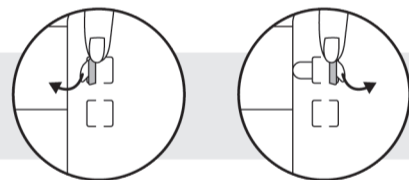


最初にグレーの部分少し立たせながら左側の差し込みを入れます。

反対側も同じように差し込みます。

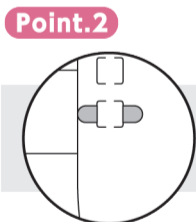

頭のサイズに合わせて引っ掛けを調整してください。

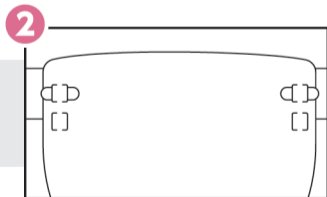


もう片方も同じように組立て、完成です。図のようになります。




※イメージなので実際と異なる場合があります

### ヘアバンドのサイズ調節

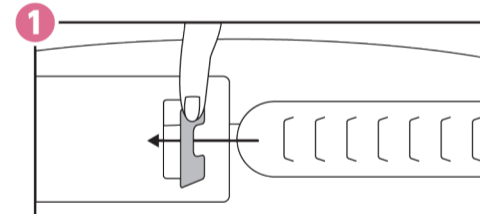

左側の差し込み穴に、右側のパーツを入れます。※図のグレー部分を持ち上げるようにして右側のパーツを入れると入りやすくなります。

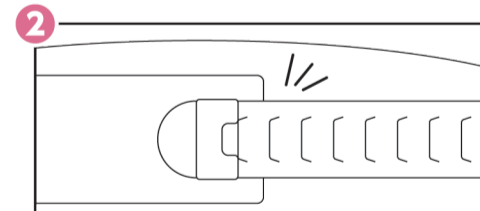

頭のサイズに合わせてお好みのサイズに調節してください。

- 商品サイズ/シールド:約H20×W29.7mm ヘアバンド:約H4×W60cm ●素材:高透明PP0.3mm ●梱包は50個入りと100個入りから選択可能です。
- 送料について:北海道・四国・九州地方の運賃は別途費用が発生致します。

### ⚠ 注意事項

- ・直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- ・角などで手を切らないようにご注意ください。
- ・簡易的な組立式の為、強く引っ張ったりしますと結合部分が破損する場合がありますのでご注意ください。

※製品仕様、梱包仕様は適宜予告なく変更する可能性があります。予めご了承ください。



NISSEY  
PRODUCTS CO., LTD

問い合わせ先  
株式会社ニッセイプロダクツ  
TEL: 03-3255-6631

※右のQRコードを読み取りいただきHPから  
メールでの問い合わせも行ってあります。▶

