

PPフェイスシールド(メガネタイプ)

ウイルス飛沫、花粉、ほこりから顔を保護するメガネ型のフェイスシールド

国内
生産品!

シールドの
オリジナル
デザイン
で印刷OK!

オフセット
フルカラー
対応

医療機関、介護施設

食品・工業関係の工場

行政・自治体施設

接客・レジなどの対面現場

などで大活躍します!



1-装着がラクラク!



メガネを付けるように装着するため着脱が簡単な上、ずり落ちる心配もありません。髪型が崩れないのもポイントです!

2-簡単な組立タイプ!



シールドとフレームが分かれている為、コンパクトに保管が可能です。

3-重さ31gの超軽量! 長時間使用しても疲れにくい!

シートの厚さが0.3mmで軽く、適度な強度があり、使いやすい仕様です。また、各工場や現場で使用されているヘアキャップなどの上からも装着が可能です。シールドは山梨県にあるグループ工場にて生産しております!

4-視界がクリアで見やすい!

クリア素材(高透明PPシート/ポリプロピレン樹脂)を使用しているため、視界がクリアです。また顔とシールドに余裕があり、マスクを着用していても違和感なく使用可能です!

5-消毒をして再利用が可能!

PP素材は耐薬品性に優れ、アルコール消毒などでのふき取りが可能です。

PPフェイスシールド(メガネタイプ) 組立説明書



1 フレーム側面にあるプラグの突起を指でつまみ上げる。



2 シートを入れ込み、フレーム穴とシートの穴の位置を合わせて固定する。



3 側面にあるプラグの突起をフレームとシート穴に奥まで差し込む。(反対側も同じようにする)



4 形を整えて完成です。

⚠ 注意事項

- ・本商品は飛沫を低減するためのものであり、ウイルスの侵入は防げません。
- ・直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- ・角などで手を切らないようにご注意ください。
- ・簡易的な組立式の為、強く引っ張ったりしますと結合部分が破損する場合がありますのでご注意ください。

梱包
内容



1カートン:20セット入り
(シールド:20枚)
(フレーム:20個)
※カートン単位での注文となります。

●商品サイズ/シールド:約H19.5×W28cm ●素材/シールド:PP0.3mm
フレーム:PC、TPR

●送料について:北海道・九州・沖縄地方の運賃は別途費用が発生致します。

※製品仕様、梱包仕様は適宜予告なく変更する可能性があります。予めご了承ください。
※フレームは中国製になります。

 NISSEI
PRODUCTS CO.,LTD

問い合わせ先
株式会社ニッセイプロダクツ TEL: 03-3255-6631

※右のQRコードを読み取りいただきHPからメールでの問い合わせも行なっております。

